



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE INSTRUMENTAL MÉDICO

HYGICLIN
by PROQUIMIA

HYGICLIN

ANS

NEUTRALIZANTE ABRILLANTADOR

NEUTRALIZANTE ÁCIDO DE BAJA ESPUMA, PARA ACLARADO FINAL EN PROCESOS AUTOMÁTICOS DE LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Neutralizante abrillantador de baja espuma, especialmente formulado para eliminar residuos alcalinos y salinos tras procesos automáticos de limpieza.

Su uso está indicado para el reprocesamiento de instrumental quirúrgico, equipamiento médico y otros productos sanitarios en lavadoras desinfectadoras, túneles y cabinas de lavado.

Gracias a su formulación, resulta compatible con los materiales metálicos y plásticos más comunes en dispositivos médicos.

Producto Sanitario Clase I para la limpieza de instrumental médico-quirúrgico, según Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.

COMPOSICIÓN

Agente ácido, Surfactantes, Agentes dispersantes y quelantes, Disolvente, Excipientes.

CARACTERÍSTICAS

- Líquido incoloro
- pH (1%) = 2,50 ± 0,50
- Densidad = 1,04 ± 0,02 g/mL



PACKAGING
Ref. 1073310

Formato: 5L



HYGICLIN
AN9

MODO DE EMPLEO

Diluir HYGICLIN AN9 a una concentración de 0,2 ml/L a 0,5ml/L en función del nivel de alcalinidad usada en la fase previa de lavado y de la calidad del agua. Para obtener un acabado óptimo, se recomienda utilizar agua descalcificada o osmotizada. La temperatura óptima del agua de aclarado es de 40 °C a 65 °C.

**LAVADO
AUTOMÁTICO**

- I. Programar la dosificación automática según el nivel de alcalinidad usada en la fase previa de lavado y la calidad del agua.
- II. Seleccionar un ciclo de aclarado con temperatura entre 40 °C y 65 °C.
- III. Seleccionar un tiempo de ciclo de entre 2 a 5 minutos.





HYGICLIN AN9

BENEFICIOS

- **Neutralizante y abrillantador** concentrado, sin colorantes ni perfume.
- **Baja formación de espuma**, apto para procesos automáticos.
- **Apto** para todo tipo de aguas.
- **Rápido** secado.
- Acabado brillante, **sin velos ni residuos salinos**.
- **Amplia compatibilidad con materiales** comúnmente utilizados en dispositivos médicos (acero inoxidable, PVC, PC, PMMA, ABS, vidrio, etc.)

PRECAUCIONES

Solo para uso profesional.

Leer la etiqueta antes de usar.

No mezclar con otros productos químicos, como lejías u otros detergentes, ya que pueden anular la eficacia de HYGICLIN AN9.

ALMACENAMIENTO



Guardar en un lugar bien ventilado, protegido de la luz solar y entre 5°C y 25°C.

Verificar que los envases estén en buen estado y con sellos intactos antes de almacenarlos.

Consultar la fecha de caducidad.

El producto es estable hasta 24 meses si se almacena adecuadamente.

ATENCIÓN



Los envases de polietileno (PE) del HYGICLIN AN9 son reciclables: desecharlos siguiendo las normativas vigentes.

Los envases plásticos son inflamables: mantener alejados de fuentes de calor o llamas.

Primeros auxilios:

CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar toda la ropa contaminada y enjuagar la piel con agua abundante o ducharse.

OJOS:

Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos. Consultar al médico si hay molestia.

INHALACIÓN:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

INGESTIÓN:

Enjuagar la boca, beber agua y buscar atención médica si hay síntomas.

Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse a PROQUIMIA, S.A. y a la autoridad competente del Estado Miembro donde esté establecido el usuario y/o el paciente.



PROQUIMIA, S.A.
A-08288490
Ctra. de Prats, 6 | 08500 Vic
(Barcelona) España
T. +34 93 883 23 53
www.proquimia.com

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001



8 437009 226063



PROQUIMIA