



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES

HYGICLIN
by PROQUIMIA

HYGICLIN AQ70

**DETERGENTE
DESINFECTANTE**
DE SUELOS
Y SUPERFICIES

**DETERGENTE-DESINFECTANTE
CONCENTRADO, EFICAZ EN UNA
SOLA ETAPA CONTRA BACTERIAS,
HONGOS Y VIRUS.**

Indicado para su uso en entornos sanitarios como hospitales, clínicas, centros dentales y residencias.

Diseñado para la higiene diaria de suelos y superficies de ámbito sanitario.

Compatible, en condiciones de uso, con metales y plásticos comúnmente usados en entornos médicos.

Registro AEMPS número 1515-DES.

COMPOSICIÓN

Cloruro de Didecil dimetil amonio - CAS N° 7173-51-5 (72,1 mg/g), excipientes.

CARACTERÍSTICAS

- Líquido de color amarillo fluorescente.
- pH (1%) = 11,20 ± 0,50
- Densidad = 1,05 ± 0,01 g/mL



PACKAGING

Ref. 1047702

Formato: 1L

Caja: 10 Un.

Ref. 1047753

Formato: 4L

Caja: 3 Un.



HYGICLIN
AQ70

EFICACIA BIOCIDA



TIPO DE ACTIVIDAD	FASE / ETAPA	ENSAYO MICROBIOLÓGICO*	DOSIS (%w/w)	TIEMPO DE CONTACTO (Min.)	MICROORGANISMOS
Bactericida	2,1	EN13727	2	1	E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa
		EN13697	0,25	60	E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa, E. Coli
	2,2	EN16615	1	1	E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa, E. Coli
Levuricida	2,1	EN13624	0,1	60	C. albicans
			1	5	
		EN13697	0,25	60	
	2,2	EN16615	1	1	
Virucida	2,1	EN14476	1	5	Modified Virus Vaccina Ankara
			5	5	Murine Norovirus
			5	5	Adenovirus Type 5

*Todos los ensayos se han realizado en condiciones sucias y a 20°C.
Para eficacias biocidas adicionales, ver Ficha Técnica.



HYGICLIN
AQ70

MODO DE EMPLEO
APLICACIÓN
EN SUELOS

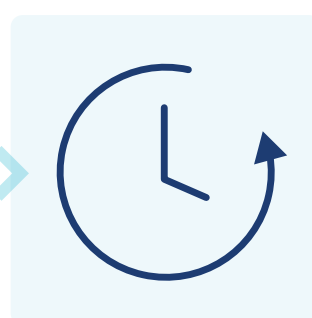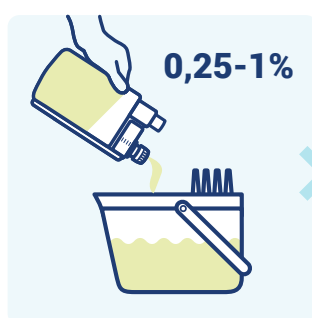

I.

Preparar una solución acuosa de HYGICLIN AQ70 al 0,25-1%, en función del nivel de suciedad y nivel de desinfección. Para una dilución de 0,25% (2,5 mL/L) por ejemplo, añadir 20 ml para 8 litros de agua fría o caliente (máx. 60 °C).

II.



Aplicar la solución con fregona y dejar actuar el tiempo de contacto indicado para lograr la actividad antimicrobiana requerida.

III.

Dejar secar al aire, sin necesidad de enjuagar.

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN
EN SUPERFICIES
DE ÁMBITO SANITARIO

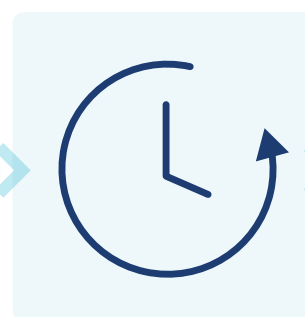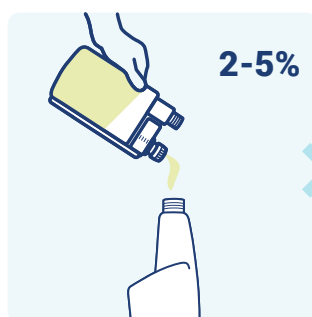

I.

Preparar una solución acuosa de HYGICLIN AQ70 al 2%-5%, en función del nivel de suciedad y nivel de desinfección.

II.

Aplicar la solución, mediante pulverizador, directamente sobre la superficie a tratar y frotar con un paño limpio.

III.

Dejar actuar el tiempo de contacto indicado para lograr la actividad antimicrobiana requerida.

IV.

Enjuagar con un paño limpio humedecido o dejar secar al aire, según el protocolo del área tratada.



HYGICLIN
AQ70

BENEFICIOS

- **Producto concentrado sin perfume** para la desinfección de suelos y superficies en áreas sanitarias.
- Diseñado para limpiar y desinfectar **en una sola etapa**.
- Amplio **espectro biocida con efecto residual y tiempos de contacto reducidos**.
- **Eficaz en todo tipo de dureza** de aguas.
- **Amplia compatibilidad** con una variedad de materiales plásticos y metálicos.

PRECAUCIONES

Solo para uso profesional.

Leer la etiqueta antes de usar.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Evitar la inhalación del producto.

Incompatible con productos clorados y aniónicos.

Buena compatibilidad con metales y plásticos

comúnmente empleados en entornos médicos, como INOX 316, INOX 304, ABS, PC y PMMA. Evitar su uso en superficies de metales débiles (como el aluminio, cobre, zinc). En caso de duda consultar con el laboratorio.

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar bien ventilado, protegido de la luz solar y entre 5°C y 25°C.

Verificar que los envases estén en buen estado y con sellos intactos antes de almacenarlos.

Consultar la fecha de caducidad.

El producto es estable hasta 2 años si se almacena adecuadamente.

ATENCIÓN

Los envases HDPE del HYGICLIN AQ70 son reciclables: desecharlos siguiendo las normativas vigentes.

Los envases plásticos y cajas de cartón son inflamables: mantener alejados de fuentes de calor o llamas.

Primeros auxilios:

CONTACTO CON LA PIEL:

Quitar toda la ropa contaminada y enjuagar la piel con agua abundante o ducharse.

OJOS:

Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos. Consultar al médico si hay molestia.

INHALACIÓN:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



PROQUIMIA, S.A.
A-08288490
Ctra. de Prats, 6 | 08500 Vic
(Barcelona) España
T. +34 93 883 23 53
www.proquimia.com

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001